

VYNIKAJÍCÍ ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE V JEDINÉM SNADNÉM KROKU

Sekusept™ PLUS

Dezinfekční a čisticí prostředek na bázi glukoprotaminu
pro manuální reprocessing zdravotnických prostředků

Sekusept PLUS obsahuje glukoprotamin
- unikátní patentem chráněnou aktivní
látku společnosti Ecolab. Tento produkt
neobsahuje aldehydy a je proto vítanou
alternativou pro péči o lékařské nástroje,
přístroje, příslušenství a pomůcky.

Přípravek je účinný proti širokému
spektru patogenů. Uživatelé mají jistotu
bezpečí a ochrany proti krví přenosným
infekcím.

Receptura je vhodná pro péči
o termolabilní materiály.
Sekusept PLUS dále nabízí:

- ▲ Čistící sílu pro silně
kontaminované nástroje
- ▲ Rychlé působení
- ▲ Dobrou materiálovou kompatibilitu



Sekusept™ PLUS

Dezinfekční a čistící prostředek na bázi glukoprotaminu pro manuální reprocessing nástrojů

Proč používat Sekusept PLUS?

Aktivní látka glukoprotamin zajišťuje, že produkt má mimořádné vlastnosti: má vynikající čistící vlastnosti a je spolehlivě účinný proti širokému spektru patogenů včetně TBC.

Tím je zaručena bezpečnost personálu, pacientů i nástrojů a to včetně flexibilních endoskopů.

ČISTÍCÍ ÚČINEK

Sekusept PLUS zajišťuje velmi dobrý čistící účinek, zejména na silně kontaminovaných nástrojích. Snadno rozpouští i zaschlou krev.

MATERIÁLOVÁ KOMPATIBILITA

Unikátní složení přípravku Sekusept PLUS je zárukou vynikající materiálové kompatibility. Tento přípravek je vhodný pro všechny druhy nástrojů ve zdravotnictví, včetně flexibilních endoskopů.

Jeho používání doporučuje také společnost Olympus. Přípravek není vhodný pro nástroje ze silikonu.

DOPORUČENÍ

Nepoužitý pracovní roztok přípravku Sekusept PLUS zůstává v kryté lázni, tj. např. v uzavřené dezinfekční vaně, stabilní po dobu 14 dní.



Glukoprotamin

VÝSLEDKY MIKROBIOLOGICKÝCH TESTŮ

ÚČINNOST	KONCENTRACE (%)	DOBA PŮSOBNÍ
Dezinfekce nástrojů dle VAH (baktericidní, fungicidní - mikroskopické kvasinkovité houby, tuberkulocidní ¹)	1,5 ¹ 2,5 4,0	60 min ¹ 30 min 15 min
Dezinfekce nástrojů v ultrazvukové lázni (tuberkulocidní dle DGHM 2001 a EN 14563)	3,0	5 min
Dezinfekce nástrojů dle RKI v případě úředně potvrzeného hromadného výskytu infekčního onemocnění (baktericidní a mykobaktericidní)	1,5	4 h
Účinný proti obaleným virům (vč. HBV, HCV, HIV) dle doporučení RKI 1/2004*	1,0	15 min
Adeno*	2,0	60 min
Polyomavirus SV40*	3,0	2 h

* DVV 2008

¹M. terrae

V případě, že pracovní roztok přípravku Sekusept PLUS aplikujete na materiály jako jsou polykarbonát, polysulfon nebo akrylátové sklo, po uplynutí doby působení ošetřovaný povrch důkladně opláchněte tak, aby nedošlo ke změnám materiálu.

DALŠÍ POSTUP

Pro finální dezinfekci v rámci manuálního reprocessingu doporučujeme použití produktu Sekusept aktiv. V případě automatizovaného ošetřování nástrojů nabízíme systém SolidSafe. Další informace Vám poskytnou pracovníci společnosti Ecolab. Pro automatizovanou péči o flexibilní endoskopy je vhodné použití speciálních přípravků, např. výrobky Olympus.



Sekusept PLUS
2 l láhev



Sekusept PLUS
6 l kanystř

PROVĚŘENÝ SPOLEHLIVÝ PRAKTICKÝ

OBLAST POUŽITÍ

Produkt je určen pro manuální reprocessing nástrojů ve zdravotnictví, flexibilních endoskopů, chirurgických lékařských nástrojů. Je vhodný pro veškeré druhy zdravotnických prostředků, včetně anestetického vybavení.

PŘÍPRAVA PRACOVNÍHO ROZTOKU

Do vany na nástroje napusťte potřebné množství studené vody, tj. vody o teplotě nižší než 30° Celsia. Do odměřeného množství studené vody ve vaně nalijete odpovídající odměřené množství koncentráту. Nástroje ponořte do roztoku tak, aby všechny jejich povrchy byly dokonale smáčené. Nástroje čistěte podle pokynů výrobce. Jestliže používáte ultrazvukovou lázeň, po dobu působení ultrazvuku lázeň zakryjte. Po uplynutí předepsané doby působení nástroje opláchněte vodou alespoň v kvalitě pitné vody. Dle platné legislativy a doporučení Institutu Roberta Kocha (RKI) je nutné připravovat čerstvý pracovní roztok pro každou směnu. V případě viditelné kontaminace připravte čerstvý roztok okamžitě.

SLOŽENÍ

100 g obsahuje následující účinné látky:
25 g glukoprotaminu

BALENÍ A OBJEDNÁVÁNÍ

PRODUKT	POČET KS V KARTONU	OBJEDNACÍ KÓD
Sekusept PLUS 2 l láhev	4	3030930
Sekusept PLUS 6 l kanystř	1	3033850

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:



Signální slovo: Nebezpečí

H302 + H332 Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

2018 / 033 APPR. 2018.08.06.

ECOLAB s.r.o.

Vocetářova 2449/5, Libeň
180 00 Praha 8
Česká republika
tel.: +420 602 156 877
www.ecolab.com



ECOLAB
DEUTSCHLAND GmbH

Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany
+49 (0) 2173 599 0
www.de.ecolab.eu

CE 0297

ECOLAB®

To whom, it concerns:

Statement/ Prohlášení:

As a manufacturer of the medical device we hereby declare the additional claims, not mentioned on the label (in accordance with Council Directive MDD 93/42, Annex I and Guidance company Ecolab on usage of Legal and Marketing Claims). /

Jako výrobce zdravotnického prostředku souhlasíme s použitím dodatečných deklarací, neuvedených na etiketě (v souladu se směrnicí Rady MDD 93/42, příloha I a směrnicí firmy Ecolab pro používání právních a marketingových deklarací).

Manufacturer of the medical device below: / Výrobce produktu, uvedeného níže:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
ECOLAB-ALLEE, 140789 MONHEIM, GERMANY

Confirms the correct use of the following declarations, which have not been a part of the current label:/potvrzuje správnost následujících deklarací, doposud neuvedených na etiketě výrobku:

Name of the product/Název produktu: **SEKUSEPT PLUS**

Risk class:/Třída nebezpečnosti: **II.b**

Efficacy against:/Účinnost proti	Test methods/test ovací metody	Conditions/Biologická zátěž	Concentration /koncentrace	Exposure time/ čas expozice
Bactericida/baktericidní	EN 13727, EN 14561	dirty/ vyšší	1%	15 min
Yesticidal/účinnost proti kvasinkám	EN 13624 EN 14562	dirty/ vyšší	1%	15 min

Date/Datum : Nov. 23rd 2017

Signatures and stamps of the manufacturer /razítko a podpis výrobce:

i.A.


Sebastian Niebur

Ecolab Deutschland GmbH
Postfach 10 02 62
40766 Monheim am Rhein

i.V.


Dr. Bernhard Meyer