

ALLEVYN® Ag Gentle Border



CZ



ALLEVYN® Krytí z antimikrobiální hydrocelulární pěny se silikonovým gelovým lepidlem.

Pro středně až vysoce secernující rány. Krytí obsahuje sulfadiazin stříbrný.

Popis

ALLEVYN Ag Gentle Border má vespůleo třívrstvou konstrukci, která kombinuje absorpční hydrocelulární polštářek obsahující SSD (sulfadiazin stříbrný), vložený mezi perforovanou vrstvu silikonového gelového lepidla pro kontakt s ránou a vodotěsnou vnější fólii. Povrch krytí ALLEVYN Ag Gentle Border pro kontakt s ránou je potažen silikonovou lepidlovou vrstvou, která zajišťuje atraumatické odstranění při výměnách krytí a umožňuje jeho zvednutí a přemístění bez ztráty jeho plnivých vlastností. Krytí lze ponechat na místě bez nutnosti sekundární fixace a lze ho snadno aplikovat i odstranit.

Princip funkce

Vypělá třívrstvá konstrukce krytí ALLEVYN Ag Gentle Border usnadňuje dynamické řízení tekutin přispívající k udržování vlhkosti v prostředí rány a snižování rizika macerace. Poskytuje rovněž účinnou bariéru proti mikrobiální kontaminaci, která chrání ránu před invazivními patogenními organismy, čímž napomáhá rychlejšímu hojení. SSD je účinný proti mikroorganismům přítomným v krytí i v ráně.

Indikace

ALLEVYN Ag Gentle Border je antimikrobiální absorpční krytí pro péči při sekundárním průběhu hojení chronických i akutních ran s plnou tloušťkou, částečnou tloušťkou nebo mělkých ran s granulační tkání, secernujících ran, jako jsou: dekubity, bérčové vředy, diabetické vředy, popáleniny, dárčovská místa, funginózy i maligní rány a rány s chirurgickou dehiscencí. ALLEVYN Ag Gentle Border lze použít na infikované rány. Pokud se výrobek používá na infikované rány, tyto rány se musí ošetřit podle místního protokolu. ALLEVYN Ag Gentle Border lze použít v kombinaci s přípravkem INTRASITE® Gel pro nekrotické nebo olupující se rány. Krytí ALLEVYN Ag Gentle Border je vhodné pro použití na křehkou kůži.

Kontraindikace

- Nepoužívejte u pacientů se známou precitlivělostí na sulfadiazin stříbrný nebo sulfonamidy.
- Vzhledem k tomu, že o sulfonamidech je známo, že způsobují kernikterus, krytí ALLEVYN Ag Gentle Border se nesmí používat u žen, které jsou v období těhotenství nebo kojení nebo se k němu blíží, u předčasně narozených dětí nebo novorozenců během prvních měsíců života.

Bezpečnostní opatření

- Pouze k zevnímu použití.
- ALLEVYN Ag Gentle Border není kompatibilní s oxidačními činidly (např. EUSOL) nebo peroxidem vodíku, protože tyto látky mohou rozkládat absorpční polyuretanovou složku krytí.
- Krytí ALLEVYN Ag Gentle Border nemusí být kompatibilní s lokálními antimikrobiálními látkami.
- V případě klinické infekce lokální stříbro nenahrazuje potřebu systémové terapie nebo jiné adekvátní léčby infekce.
- Pokud se objeví zarudnutí nebo podráždění kůže, přestaňte krytí používat a obraťte se na zdravotnického pracovníka.

Dostupnost produktu

Kód	Rozměry	Dostupnost
66800436	7,5 cm x 7,5 cm	Krabičce 10 ks
66800437	10 cm x 10 cm	Krabičce 10 ks
66800438	12,5 cm x 12,5 cm	Krabičce 10 ks
66800439	17,5 cm x 17,5 cm	Krabičce 10 ks

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hesse Road, Hull HU3 2BN Anglie.

®Ochranná známka společnosti Smith & Nephew

©Smith & Nephew Datum vydání 02/2020. Vyrobeno v Číně.



2797



Sterilizováno ethylenoxidem
Nepoužívejte, pokud je obal poškozený
Nepoužívejte opakovaně
Prostudujte si návod k použití
Uchovávejte v suchu (<25 °C)
Upozornění
Chraňte před slunečním světlem

ALLEVYN® Ag Gentle Border



PL



Samoprzelepny przeciwbakteryjny hydrokomórkowy opatrunek piankowy ALLEVYN® z silikonową warstwą adhezyjną.

Odpowiedni do ran z umiarkowanym i dużym wysiękiem. Opatrunek zawiera sulfadiazin srebra.

Opis

Opatrunek ALLEVYN Ag Gentle Border ma zaawansowaną trójwarstwową konstrukcję, która obejmuje chłonną hydrokomórkową wkładkę SSD (sulfadiazyn srebra) umieszczoną pomiędzy perforowaną silikonową warstwą adhezyjną stykającą się z raną i wysoko przesuwaną wodoodporną folią zewnętrzną. Powierzchnia styku z raną opatrunku ALLEVYN Ag Gentle Border jest pokryta silikonową warstwą klejącą, która zapewnia atraumatyczne usuwanie przy zmianie opatrunku oraz umożliwia jego uniesienie i ponowne umieszczenie bez utraty właściwości samoprzelepnych. Opatrunek można pozostawić na miejscu bez konieczności dodatkowego mocowania i jest on łatwy zarówno do założenia, jak i usunięcia.

Spósb działania

Zaawansowana trójwarstwową konstrukcją ALLEVYN Ag Gentle Border ułatwia dynamiczne zarządzanie płynem, aby pomóc utrzymać wilgotne środowisko rany i zmniejszyć ryzyko maceracji. Produkt stanowi również skuteczną barierę przed skażeniem mikrobiologicznym, chroniąc ranę przed inwazją chorobotwórczych drobnoustrojów i tym samym przyspieszając gojenie. SSD jest skuteczny w przypadku drobnoustrojów obecnych w opatrunku i w ranie.

Wskazania

Opatrunek ALLEVYN Ag Gentle Border jest przeciwbakteryjnym opatrunkiem chłonnym przeznaczonym do wórnego leczenia przewlekłych i ostrych ran częściowo lub całkowicie głębszych lub płytkich z ziarninowaniem, z wysiękiem, takich jak: odleżyny, owrzodzenia żylna, owrzodzenia cukrzycowe, oparzenia, miejsca pobrania przeszczepu, z zakażeniem grzybiczym/rany nowotworowe i rozchodzące się rany pooperacyjne. Opatrunek ALLEVYN Ag Gentle Border może być stosowany na zakażone rany. W przypadku stosowania produktu na zakażone rany należy je leczyć zgodnie z lokalnym protokołem. Opatrunek ALLEVYN Ag Gentle Border może być stosowany w połączeniu z żelem INTRASITE® Gel w przypadku ran z łkanką martwiczą lub martwicą rozplywną. Opatrunek ALLEVYN Ag Gentle Border nadaje się do stosowania na delikatnej skórze.

Przeciwwskazania

- Nie stosować u pacjentów ze znaną nadwrażliwością na sulfadiazyn srebra lub sulfonamidy.
- Ponieważ wiadomo, że sulfonamidy wywołują zóółtaczkę jęder podkorowych mózgu, opatrunku ALLEVYN Ag Gentle Border nie należy stosować u kobiet, które są w ciąży lub zbliża się u nich termin porodu lub karmią piersią, u wcześniaków lub noworodków w pierwszych miesiącach życia.

Środki ostrożności

- Wyłącznie do stosowania zewnętrznego.
- Opatrunek ALLEVYN Ag Gentle Border nie jest zgodny ze środkami ułnienającymi (np. EUSOL) ani nadtlenkiem wodoru, ponieważ mogą one spowodować rozerwanie poliuretanowego skłńadnika opatrunku.
- Opatrunek ALLEVYN Ag Gentle Border może nie być zgodny z miejscowo stosowanymi lekami przeciwbakteryjnymi.
- W przypadku klinicznego zakażenia srebro stosowane miejscowo nie zastępuje wymaganego leczenia ogólnoustrojowego lub innego odpowiedniego leczenia zakażenia.
- Jeśli wystąpi zaczerwienienie lub uczulenie, przerwać stosowanie i skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.

Dostępność produktu

Kod	Wymiary	Dostępność
66800436	7,5 cm x 7,5 cm	Kartonik zawiera 10 sztuk
66800437	10 cm x 10 cm	Kartonik zawiera 10 sztuk
66800438	12,5 cm x 12,5 cm	Kartonik zawiera 10 sztuk
66800439	17,5 cm x 17,5 cm	Kartonik zawiera 10 sztuk

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hesse Road, Hull HU3 2BN Anglia.

®Znak towarowy firmy Smith & Nephew

©Smith & Nephew Data wydania 02/2020 Wyprodukowano w Chinach.



2797



Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu
Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone
Nie stosować ponownie
Zapoznać się z instrukcją użycia
Przechowywać w suchym miejscu (<25 °C)
Przeostroga
Przechowywać z dala od światła słonecznego