

Rx Only



Nosní tamponáda

RAPID RHINO[®]**Návod k použití****POPIS**

Nosní tamponáda RAPID RHINO[®] je vyrobena zdravotnické polyuretanové pěny s tvárnou buněčnou strukturou, která může být stlačena a i přesto se vrátí do své původní nestlačené podoby. Pěnový substrát působí jako podpora a výplň komor dutiny nosní. Pěna je pokryta PVC fólií. Film pokrývá vrstva zesílené pletené karboxymethylcelulózy (CMC). Tkanina, která nasává tekutinu a tvoří tak gel, zastaví menší krvácení, ale zachová rovněž vlhké prostředí, které usnadňuje snadné odstranění. Hydrokoloidní tkanina vytváří vlhkou gelovou bariéru mezi produktem a slizniční tkání.

INDIKACE PRO POUŽITÍ

Nitronosní dlahy je určena ke snížení krvácení a otoku a k zabránění srůstů mezi přepážkou a nosní dutinou. Je umístěna do nosní dutiny po operaci nebo po úrazu.

KONTRAINDIKACE

Nejsou známy žádné kontraindikace. Použití nosní tamponády RAPID RHINO je nutné konzultovat s lékařem.

**VAROVÁNÍ A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ****Varování**

Výrobek nepoužívejte k jiným účelům než k účelům, pro které byl vyroben.

Nežádoucí reakce

- Možnost infekce, opakujícího se nebo přetrvávajícího krvácení a dislokace tamponády vyžadující lékařské ošetření.
- Při použití některých nosních krycích materiálů, které sají tekutiny, byl hlášen výskyt syndromu toxického šoku. Ten může způsobit smrt; proto by případné známky šoku měly být sledovány u všech pacientů.
- Fyzicky malí pacienti nebo pacienti s mělkým nosohltanem mohou mít potíže s dýcháním v důsledku nesprávného umístění produktu.
- U pacientů s poškozenou dýchací soustavou může dojít k dechovým obtížím nebo sníženému okysličování.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Vyjměte nosní tamponádu RAPID RHINO z obalu a vložte do misky se sterilní vodou.
2. Po dobu 30 sekund nechte tamponádu nasáknout ve sterilní vodě, aby se mohl aktivovat hydrokoloidní materiál, NEPOUŽÍVEJTE FYZIOLOGICKÝ ROZTOK.
3. Uchopte kleštičkami a jemně přesuňte tamponádu na požadované místo. Abyste maximálně zvýšili účinnost, pokryjte celou obnaženou tkáň.
4. Abyste omezili pohyb tamponády a zajistili snadné odstranění, připevněte tamponádu pacientovi na tvář pomocí pásky se šňůrkou pro odstranění tamponády.
5. Chcete-li tamponádu odstranit, opatrně zatáhněte za šňůrku.

6. Abyste předešli sekundárnímu odumírání chrupavčité nosní pyramidy nebo kolumely, doporučujeme připevnit šňůrku ke tváři nebo kosti nosní pyramidy pouze lehce.
7. Kat. # RR 300 a RR 400 odstraňte do 72 hodin.
8. Kat. # RR 300 a RR 800 odstraňte do 24 hodin.

JAK JE VÝROBEK DODÁVÁN

Výrobek je dodáván sterilní a je určen **POUZE K JEDNORÁZOVÉMU POUŽITÍ**. Výrobek **neumývejte, opakovaně nesterilizujte ani znovu nepoužívejte, protože by mohlo dojít k poškození nebo ohrožení výkonu a následně k poškození přístroje, jeho selhání nebo k poranění pacienta**. Čištění, resterilizace nebo opětovné použití výrobku může také vystavit pacienta riziku přenosu infekčních chorob.

Tento výrobek je sterilizován použitím ethylenoxidu.

Výrobek není vyroben z přírodního latexu.

LIKVIDACE

Výrobek musí být zlikvidován v souladu s platnými vládními nařízeními a v souladu s plánem nakládání s odpadem příslušného zdravotnického zařízení.

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

Informace o záruce

Záruka materiálu, funkčnosti a využití se vztahuje pouze v případě použití u jednoho pacienta. **NEPOUŽÍVEJTE OPAKOVANĚ. TATO ZÁRUKA NAHRAZUJE VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ, A/NEBO ZÁKONNÉ, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI A/NEBO PŘÍMĚŘENOSTI PRO DANÝ ÚČEL, A VŠECH DALŠÍCH POVINNOSTÍ A ZÁVAZKŮ SPOLEČNOSTI ARTHROCARE.**

Reklamacie výrobku

Všechny dotazy, stížnosti nebo žádosti o vrácení by měly být směřovány na zákaznický servis nebo zplnomocněného zástupce společnosti.



Výrobce

ArthroCare Corporation
7000 West William Cannon Drive
Austin, TX 78735 USA
Telefon: +1 (800) 343-5717
ZÁKAZNICKÁ PODPORA
www.arthrocare.com



Zplnomocněný zástupce pro Evropu

Smith & Nephew Orthopaedics GmbH
Alemannenstrasse 14
78532 Tuttlingen
Německo
ec.rep@smith-nephew.com

PŘEHLED SYMBOLŮ

	Katalogové číslo
	Číslo série
	Datum použitelnosti
	Nahlédněte do návodu k použití
	Nepoužívejte opakovaně
	Neprovádějte opakovanou sterilizaci
	Pokud je obal poškozen, výrobek nepoužívejte
	Uchovávejte v suchu
	Chraňte před slunečním světlem
	Upozornění
	Sterilizováno pomocí ethylenoxidu
	Výrobce
	Zplnomocněný zástupce pro Evropu
	UPOZORNĚNÍ: Podle federálního zákona USA lze tento produkt prodávat pouze lékařům na základě objednávky.
	Značka CE. Tento produkt splňuje základní požadavky směrnice o zdravotnických prostředcích (93/42/EHS).

° Ochranná známka společnosti Smith & Nephew.

Tento výrobek může být chráněn jedním nebo více americkými patenty. Podrobnosti naleznete na smith-nephew.com/patents.

© Smith & Nephew 2020.